

Alcoholímetro TM-7500

MANUAL DE USUARIO

Alcoholímetro Digital Modelo: TM-7500

Tabla de Contenidos

Introducción	1
Preparación para obtener mediciones correctas	1
Inserción de las baterías.....	1
Descripción de las partes.....	1
Funcionamiento.....	2
Accesorios	2
Errores comunes y solución de problemas.....	3
Recomendaciones.....	3
Especificaciones	3
Calibración y Registro	3
Precauciones.....	4
Garantía	4

Introducción


- El uso previsto de este dispositivo es medir la presencia de alcohol en el aliento humano. Las mediciones obtenidas con este dispositivo se utilizan en el diagnóstico de la intoxicación alcohólica.
- La precisión de este dispositivo se ha establecido en concentraciones de alcohol en sangre de 0.008 y 0.032% BAC. No se ha establecido la precisión en concentraciones de alcohol en sangre superiores a 0.032%.

Preparación para obtener mediciones correctas

- Antes de iniciar la prueba, espere por lo menos 15 minutos después de haber bebido por última vez.
- Solamente utilice el dispositivo a temperaturas entre 10 - 40°C o 50 - 104°F.


Inserción de las baterías

- Retire la tapa de la batería que encontrará en la parte posterior del dispositivo.
- Inserte 1 batería alcalina de 9V, asegurándose de que los símbolos "+/-" estén alienados correctamente.

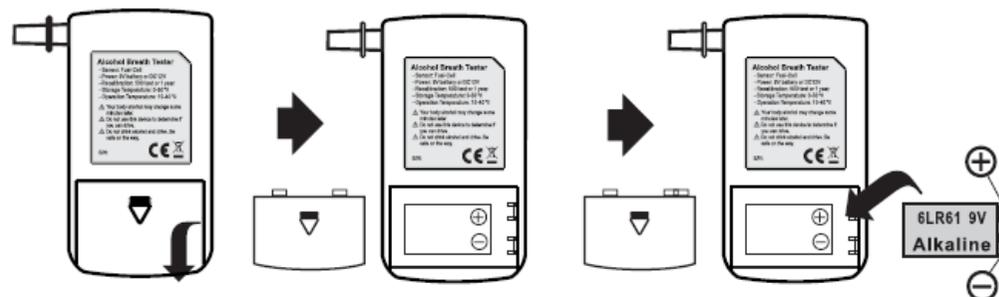

- Si el voltaje de la batería es muy bajo, el dispositivo podrá mostrar en la pantalla el símbolo "🔋" y no funcionará correctamente. Necesitará sustituir la batería por una nueva.


Descripción de las partes

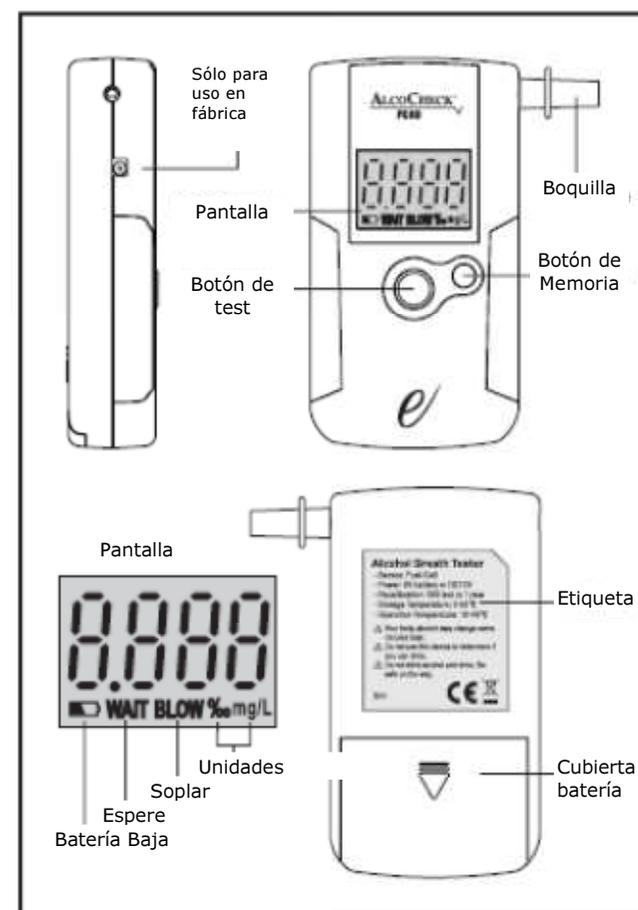


Funcionamiento

Modo de Prueba


- Inserte una de las boquillas en el orificio tal como se indica a continuación:

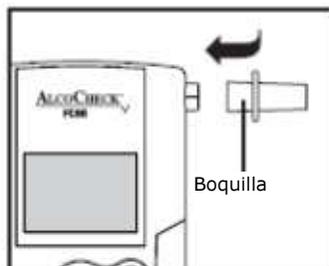


- Mantenga presionado el botón "TEST" hasta que el alcoholímetro se encienda. Deje de pulsar el botón una vez se haya encendido.

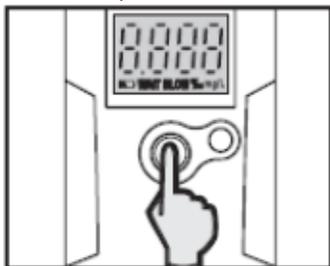


- El indicador "WAIT" (espere) aparecerá en la pantalla y se iniciará la cuenta atrás desde el 15 hasta el 0.

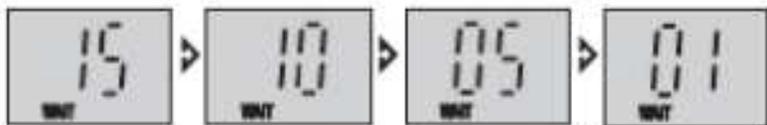

- A continuación aparecerá el indicador "BLOW" (sople) en la pantalla así como unas "C" intermitentes. Respire profundamente, y sople de manera sostenida en la boquilla hasta que la señal acústica se detenga (aproximadamente 6 segundos).

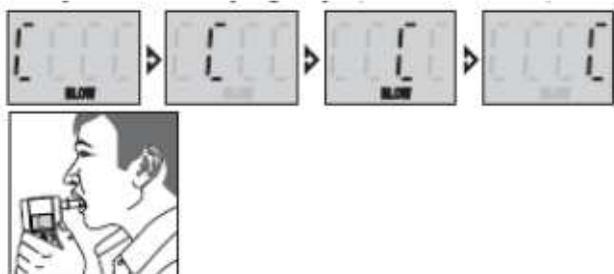

- El dispositivo muestra el indicador "WAIT" (espere) así como unas "O" intermitentes en la pantalla.

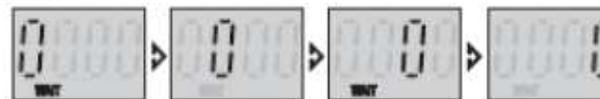

- El resultado del test se mostrará en la pantalla durante 20 segundos.




- Se mostrará Err (error) cuando no se haya soplado de forma correcta. Consulte la sección de "Errores comunes y solución de problemas" para más detalles. El dispositivo se apagará automáticamente después del error indicado.



Modo de memoria

- Después de realizar la prueba, el dispositivo muestra el resultado obtenido durante 20 segundos. Presione el botón "Memory" (memoria) para acceder a los resultados de las 5 pruebas anteriores.

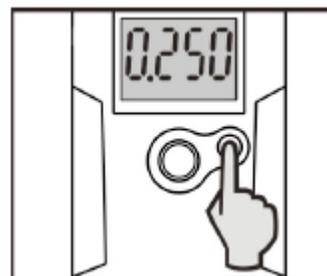

- El dispositivo se apagará automáticamente después de mostrar un resultado durante 20 segundos.
- El botón de memoria sólo se utiliza en este modo de operación.

Accesorios

- Boquillas
- Manual de instrucciones

Registro de Calibración			
Fecha de primer uso		Numero de serie	
No.	Fecha de Calibración	Comentarios	Calibrado por:

Precauciones

- La concentración de alcohol en sangre (BAC) puede cambiar pasados unos minutos
- Se debe calibrar el alcoholímetro cada 12 meses. No calibrar el alcoholímetro puede causar mediciones incorrectas.
- No utilice este dispositivo para determinar si puede conducir.
- No puede utilizar los resultados de este dispositivo ante un tribunal de justicia.
- No puede utilizar los resultados de este dispositivo en contra de los obtenidos por dispositivos de uso policial.

Garantía

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos que este dispositivo se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales bajo el uso normal durante el periodo de UN (1) AÑO desde el momento de la compra.

El periodo de garantía no incluye el servicio de calibración. La garantía cubre partes y mano de obra en las reparaciones cubiertas, así como el transporte para enviarlo de vuelta al cliente local.

Si algún defecto apareciera, y se recibe una reclamación válida durante el periodo de garantía, se tomará una de las siguientes acciones:

- (1) Se reparará el dispositivo
- (2) Se reemplazará el dispositivo, por uno nuevo o usado pero equivalente al equipo original.

(3) Se reembolsará el precio de compra del dispositivo

Para solicitar un servicio en garantía siga estas instrucciones:

1. Llame o envíe un email a su distribuidor para obtener un número RMA.
2. Envíe el dispositivo a portes pagados, asegurado y en un embalaje apropiado.
3. Debe obtener un comprobante de entrega del dispositivo, y debe hacerse cargo del coste del envío del dispositivo.
4. Debe enviar la siguiente información junto con el dispositivo:
 - a. El formulario RMA y la descripción del problema.
 - b. Su nombre y la dirección completa a la que se debe enviar el dispositivo.
 - c. Su número de teléfono.
 - d. Una copia de la factura de compra.

Distribuido por:

VinciLab
Healthcare ■■

Paseo de las Delicias 30, 2ª planta
28045 Madrid, España
Tel. +34 - 917 883 411
Fax. +34 - 912 302 479

Fabricado para:

trendmedic
Nonnenwaldstrasse 26
82377 Penzberg
Deutschland / Germany

Última revisión: septiembre 2016